



## Contour Desinfektionstücher - Halten Sie Ihre Contour-Produkte sauber!

Mit den Contour Disinfectant Wipes können Sie stets Ihre Contour-Produkte frei von Bakterien, Pilzen und Viren halten. Die Desinfektionstücher basieren auf dem DESTIX® MA61, welches mit 70% Alkohol sich für das schnelle desinfizieren für sämtliche Contour-Produkte eignet. Jedoch nicht für Alkohol-unbeständige Materialien wie etwa dem Acrylglas. Kontaktdauer: 1 Minute!

### Allgemeine Informationen

Contour Disinfectant Wipes sind gebrauchsfertige Desinfektionstücher, die sich besonders für die Desinfektion von Geräten eignen. Sie werden dort angewandt, wo ein Infektionsrisiko besteht und eine schnelle Kontaktdauer erforderlich ist. Vor allem auf kleineren Oberflächen und Bereiche, auf denen eine zügige Desinfektion erforderlich ist. Das Desinfektionsmittel sowie die Tücher dürfen jedoch nicht für invasiv medizinische Versorgung wie beispielsweise chirurgischen Instrumenten, Hörgeräten und der Otoplastik verwendet werden.

Die Contour Disinfectant Wipes wirken effektiv gegen Bakterien (inkl. MRSA), Pilzen (Candida Albicans, Aspergillus niger) und Viren (BVDV, Vaccina, Noro, Rota). Das Produkt hat eine mykobakterizide und tuberkulozide Wirkung (M. Terrae, M. Avium). Kontaktdauer: 1 Minute.

Contour Disinfectant Wipes sind Desinfektionstücher, die frei von Duftstoffen sind. Die enthaltene Desinfektionsflüssigkeit ist frei von Aldehyden, Formaldehyd und Phenolen.



# Contour Disinfectant Wipes

## Gebrauchsanweisungen

Reinigen Sie zunächst die Oberfläche gründlich mit einem Contour Disinfectant Wipe. Lassen Sie die Desinfektionsflüssigkeit für 1 Minute einwirken, bevor Sie danach die Rückstände mit einem sauberen und trockenen Tuch entfernen. Bitte beachten Sie noch vor der Anwendung das angebrachte Etikett und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Contour Disinfectant Wipes sind nicht für Alkohol-unbeständige Materialien wie etwa dem Acrylglas geeignet!

## Warnhinweise

Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Desinfektionstücher in den Abfall. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 °C aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Hautkontakt vermeiden.

Achtung! Entflammbar. Enthält Alkohol.

Verwenden Sie das Produkt nur für alkoholbeständige und nicht poröser Oberflächen.



## Technische Daten

Ethanol (pro 100 g Desinfektionsflüssigkeit)	24 g
1-Propanol (pro 100 g Desinfektionsflüssigkeit)	37 g
Haltbarkeit	2 Jahre ab Produktionsdatum (ungeöffnet)
Alkoholgehalt	70%
Verpackung	Schachtel mit 20 Tüchern